

シロナは ビルトイン

3システムで衛生的な
水質を約束

TENEO/SINIUSに標準装備 水質維持のための3つのシステム

シロナトリートメントセンター内の水質は3つのシステムで衛生的に維持されます。そのためにはこの3つのシステムがトリートメントセンター内にビルトインされる必要があり、またビルトインされることで確実に稼働させることができます。このシステムはヨーロッパでは既に30年以上の実績があり、広く普及するとともに、信頼性に優れています。



シロナ水清浄システム※1

1. ビルトイン 清浄水供給 システム

常時、上水に1%の割合でデントセプトPを添加し、トリートメントセンター内のうがい水、シリンジ水、インスツルメント用冷却スプレー水に使用することで衛生的な水質を維持します。デントセプトPをビルトインタンクに入れるだけで、自動的に実施されます。

2. ビルトイン サニテーション


滞留水を排出したトリートメントセンター内水回路にデントセプトP(1.41%過酸化水素水+Agイオン)原液を満し、その状態で24時間以上(>72時間)滞留させることにより、強力に水回路内を洗浄します。4週間に1回行います。

3. ビルトイン パージ/ オートパージ 機能※2

患者治療終了毎に使用したインスツルメント水回路から水を排出するパージと1日の治療開始前にトリートメントセンター内の全水回路から滞留している水を強制的に排出し、新しい水と入れ替えるオートパージがあります。

※1 TENEO, SINIUS, SINIUS TSは標準仕様、INTEGO Proはオプション、INTEGOは簡易型をオプションで装備。

※2 TENEO, SINIUS, SINIUS TS, INTEGO Proは標準仕様、INTEGOはオプションで装備。

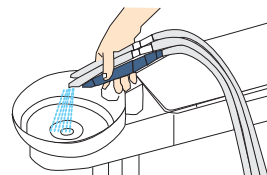

シロナ水清浄システム
専用清浄剤
デントセプトP



デントセプトPは1.41%過酸化水素水に銀イオンを加えたシロナ水清浄システム専用の洗浄剤です。「清浄水供給システム」と「サニテーション」に使用されます。

参考文献をご提供します。ご入り用の場合は弊社担当者までお申し付けください。
参考文献：「EUにおける一般歯科診療所でのデンタルユニット給水システム内細菌汚染の抑制に対する消毒剤の有効性の比較」

シロナ水清浄システム水回路

DGKH (ドイツ病院保健衛生協会 / German Society for Hospital Hygiene) はシロナトリートメントセンター※3の衛生安全性を認証しました。

MADE IN
GERMANY



※3包括的試験を実施した後、DGKHの特別委員会は、TENEOおよびSINIUSはロベルト・コッホ研究所(RKI : Robert-Koch-Institut)、ドイツ連邦医薬品医療機器研究所 (BfArM : Federal Institute for Drugs and Medical Devices) およびドイツ歯科衛生ワーキンググループ (German Working Group for Dental Hygiene) の厳格な衛生要件を満たしていることを確認しました。

ご用命は

製造販売

シロナデンタルシステムズ株式会社

本社 / 〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル5F

■支店・営業所

| | | | |
|--------|-------------------|---------|-------------------|
| ■札幌支店 | Tel: 011-709-5800 | ■盛岡営業所 | Tel: 019-604-2340 |
| ■仙台支店 | Tel: 022-266-4020 | ■庄内営業所 | Tel: 0235-29-1217 |
| ■東京支店 | Tel: 03-5148-7895 | ■宇都宮営業所 | Tel: 028-614-3710 |
| ■名古屋支店 | Tel: 052-251-8467 | ■横浜営業所 | Tel: 045-440-1521 |
| ■大阪支店 | Tel: 06-6243-6636 | ■静岡営業所 | Tel: 054-653-2711 |
| ■福岡支店 | Tel: 092-518-1800 | ■広島営業所 | Tel: 082-546-2301 |

www.sirona.co.jp



※改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。

BT 4201PD

The Dental Company

sirona